

ETIQUETTE SERVICE PRESCRIPTEUR ou	ETIQUETTE Code APH MEDECIN ou	ETIQUETTE PATIENT ou	ETIQUETTE Code APH PRELEVEURS ou
Code Hôpital-UH :	Nom : Prénom : Code APH :	Nom : Prénom : NIP/IPP : Date de naissance : Sexe :	Nom : Prénom : Code APH :
PDBS oct 2022 HÔPITAL SAINT-LOUIS 1 av. Cl. Vellefaux 75010 Paris LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE BIOLOGIQUE - DMU BIOGEM Pr Samia MOURAH - Pr Evelyne JACQZ-AIGRAIN		SUIVI THERAPEUTIQUE PHARMACOLOGIQUE - PHARMACOCINETIQUE L. Goldwirt 01 42 49 43 25 / H. Sauvageon 01 42 49 42 87 Laboratoire 01 42 49 93 36 / Réception 01 42 49 94 46 Fax 01 42 49 95 78	



■ Téléphone du Prescripteur :	Fax du Prescripteur :	☐ Pas de result@ts dans cyberlab
■ Mail du Prescripteur :		
■ DATE du prélèvement :	/ /	ETIQUETTE LABO
■ H du prélèvement :	H	
■ H de réception :		H

Dosage de TENOFOVIR-DIPHOSPHATE (TFV-DP) et EMTRICITABINE-TRIPHOSPHATE (FTC-TP)
sur dépôt de sang séché (Dried Blood Spot, DBS)

Prélèvement à réaliser sur un Tube EDTA 5mL

☒ Tenofovir-diphosphate (TFV-DP) et Emtricitabine-triphosphate (FTC-TP)

CONTEXTE CLINIQUE DE LA DEMANDE

☐ Traitement antirétroviral en cours

..... Posologie : mg fois par jour Dernière prise : le / / à H

..... Posologie : mg fois par jour Dernière prise : le / / à H

..... Posologie : mg fois par jour Dernière prise : le / / à H

☐ Prophylaxie pré-exposition (PreP) : Date d'initiation de PreP: / /

☐ Schéma continu

☐ Schéma discontinu Fréquence de prise :

..... Posologie : mg fois par jour Dernière prise : le / / à H

Réception des prélèvements du lundi au vendredi de 9h à 16h

A réception du prélèvement au laboratoire :

- Ne pas centrifuger
- Le DBS doit être préparé dès que possible après le prélèvement de sang, dans les 24h maximum, selon la procédure au verso

Laboratoire extérieur :

=> Envoyer le tube primaire à température ambiante le plus rapidement possible (réception <24h après le prélèvement)
=> Si ce délai n'est pas envisageable effectuer le dépôt de sang séché sur buvard selon la procédure au verso et adresser le buvard sous sachet à l'abri de la lumière à -20°C au Laboratoire de pharmacologie biologique
- Hôpital Saint Louis - 1 Avenue Claude Vellefaux - 75010 PARIS

Cotation : 2 x BHN 400- Code NABM M115

Pour tout renseignement :
Veuillez contacter Dr. Lauriane GOLDWIRT
lauriane.goldwirt@aphp.fr / 01 42 49 43 25

CADRE RESERVE AU CENTRE DE TRI

Prélèvement
reçu



Rouge



Jaune



Violet



Vert



Sérum
Plasma



LCR



Ponction

Identification d'une non-conformité critique :

Cocher la case non-conformité critique sous le Code à Barres et indiquer la nature de cette non conformité ci dessous :

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Pvt(s) manquant(s) | ☐ Pvt(s) non étiqueté(s) | ☐ Identité (discordance prélèvement/feuille) |
| ☐ Pvt(s) non conforme(s) | ☐ Pvt(s) accidenté(s) | ☐ Feuille non étiquetée |

Identification d'une non-conformité non critique :

Cocher la case du type de non-conformité non critique sous le Code à barres

*Traçabilité du traitement
de la demande*



- | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--|
| ☐ NC Critique | ☐ NC Prescription | ☐ NC Identité | ☐ NC Echantillon | ☐ NC Acheminement |
|---|--|--------------------------------------|---|--|

PROCEDURE DE PREPARATION ET STOCKAGE DES DRIED BLOOD SPOTS

Matériel nécessaire :

- Prélèvement sanguin sur tube EDTA
- Whatman Protein Saver Card #903
- Sachet zip lock
- Sachet de dessiccant (ou sachet déshydratant)
- Indicateur d'humidité
- Gants latex ou nitrile non poudrés
- Marqueur résistant à l'eau
- Micropipette 10-100 µL or 20-200 µL avec cône adapté à filtre
- Boite en carton/plastique de taille adaptée pour congélation à -80°C

Préparation du DBS :


Le DBS doit être préparé dès que possible après le prélèvement de sang, dans les 24h maximum. Le sang peut être conservé à température ambiante (25 +/- 5 °C) jusqu'à ce que le DBS puisse être préparé.

1. Veiller à ce que les deux mains soient gantées avant de manipuler la carte Saver Protein. Ne pas toucher les zones où le sang sera déposé (la portion de papier filtre).
2. Identifier la carte DBS
3. Assurer une agitation douce par retournement pendant 10 minutes du tube de sang total.
4. Retirer le bouchon du tube de prélèvement, et prélever 25 µL de sang total dans le tube.
5. Déposer 25 µL de sang total au centre de chaque cercle de la carte Saver Protein en une poussée unique, la pipette doit être maintenue à environ 3 mm au-dessus de l'emplacement du spot, sans toucher la carte.

Carte correctement remplie



Carte incorrectement remplie

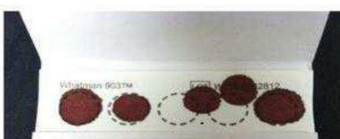

6. Sécher à l'air libre et à température ambiante (25 +/- 5°C) les cartes pendant au moins 2 heures sans couvrir les tâches. Une nuit de séchage est acceptable.
7. Après séchage, utiliser le rabat pour couvrir les tâches. Placez la carte Saver Protein dans un sachet zip-lock avec un indicateur d'humidité et un sachet déshydratant pour réduire l'humidité, une seule carte par sachet zip-lock.
8. Identifier chaque sachet zip lock

Envoi au laboratoire :

- Placer le sachet zip-lock dans une boîte en carton
- Le transport devra s'effectuer en carboglace

Stockage au laboratoire :

- Stocker le sachet zip-lock dans une boîte en carton à -80°C