

**Traitement pré-analytique des prélèvements de Biologie Endocrinienne lorsque le délai d'acheminement est > à 8H (sec, hépariné et échantillon urinaire) ou > à 4H (EDTA + aprotinine)**



**Sec avec  
gel séparateur :**  
Centrifuger et  
conserver à +4°C



**Héparinate  
de lithium avec  
gel séparateur :**  
Centrifuger et  
conserver à +4°C



Ou



**Monovette  
urine :**  
Conserver à  
+4°C



**EDTA + Aprotinine :**  
Centrifuger,  
décanter et  
congeler à -20°C

**ACTH  
Glucagon**