



Le réseau pneumatique fonctionne 24h/24h, il achemine les « sacs parachutes » depuis les services de soins vers la Réception Centralisée de Biologie (RCB).

1. RESPECT DES COULEURS DE SACHETS : indispensable au pré-tri des échantillons reçus, merci d'y veiller

Biochimie : vert Hématologie : rouge Toxicologie : doré Bactériologie : transparent Anatomopathologie : jaune Examens externalisés : violet EFS : bleu CRB : rose

2. REGLES DE BONNE PRATIQUE

- Envoi régulier avec **10 tubes maximum** par sac « parachute » : les tubes doivent être dans le sens de la longueur du sac parachute.
- Contenants hermétiquement fermés
- Envoi à 4°C : **glaçons interdits**, utiliser les **carbhy pad exclusivement**
- **Hémocultures** : maximum 2 flacons sans tube associé
- **Pièces opératoires d'un volume supérieur à un flacon pré-rempli de 150 mL** : pas d'envoi par pneumatique (prise en charge par le coursier de la RCB)
- 🚑 **Prélèvement urgent** : étiquette jaune fluo sur le sachet double poche dans un sac parachute (pas d'étiquette sur le sac parachute) puis **envoi immédiat**
- 🚑 **Prélèvement d'urgence vitale et/ou extemporané et/ou prélèvement non fixé en formol** : acheminement pédestre par les services de soins et remise en main propre dans le laboratoire concerné
- **Prélèvements destinés à l'EFS** :
 - De 07h00 à 19h00 envoi par pneumatique vers la RCB
 - De 19h00 à 07h00 acheminement pédestre par un agent du service directement à l'EFS
 - A toutes heures, si urgence** : acheminement pédestre par un agent du service de soins directement à l'EFS
- **Examen d'hémostase** : PFA, cytométrie des plaquettes et agrégation plaquettaire : acheminement pédestre

- **LCR et autres liquides** : un seul type de tube accepté (non-conformité sinon)



n°SAP10527506



Acheminement par pneumatique

- **Gaz du sang** :



et



Acheminement par pneumatique
Bien fermer et tester l'étanchéité avant envoi
Si fuite, le prélèvement sera considéré non conforme

- **Hémocultures BK (flacon en verre) :**



Acheminement pédestre

- **Redons** : contenants non hermétiques, acheminement pédestre



Acheminement pédestre

Recommandations pour l'utilisation des pneumatiques par les services soins

3. MAINTENANCE DE LA GARE

Prévoir une fois par mois, le nettoyage de la gare pneumatique avec un essuie-tout enduit d'anti-adhésif puis rinçage avec une solution alcoolisée.

4. POSITIONNEMENT DES TUBES

