
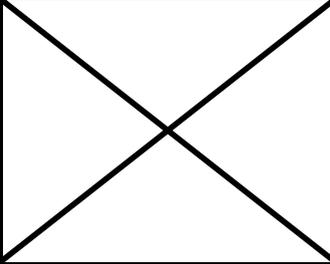
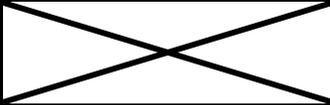


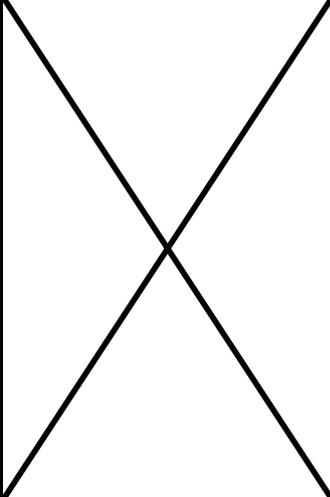

ORDRE	DENOMINATION ET COULEUR DES BOUCHONS		
	Adulte		Pédiatrique
1		Tube de purge (à envoyer avec le tube citrate de sodium) ou Flacon d'hémoculture (<u>aérobie</u> puis <u>anaérobie</u>)	
	Ou  		
2	 	Hémostase = citrate de sodium ou CTAD ⚠ <u>Respecter le niveau de remplissage.</u> ⚠ <u>Homogénéisation des tubes par retournements lents et complets.</u>	 Tube citaté pédiatrique
3		Tube sec SST II avec gel séparateur	
		Tube sec sans gel	
4		Tube héparine lithium avec gel séparateur	
		Tube héparine lithium sans gel	
5		Tube EDTA	 Tube EDTA pédiatrique
6		Tube fluorure oxalate	
		Tube EDTA-aprotinine	
		Tube éléments-traces	
		Tube ACD	
		Tube PAXgen® (sur site SLS)	

👉 Recommandations du CLSI (<https://www.clsi.org/>), voir le site du Groupe d'Etude sur l'Hémostase et la Thrombose (GFHT) <https://site.geht.org/>